

PREMIUM RESTORATIVES

CAVEX TEMPORARY CEMENT

-
Cemento libre de eugenol para la cementación
de coronas provisionales y puentes.



**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

CAVEX

PREMIUM RESTORATIVES

CAVEX TEMPORARY CEMENT

Un cemento dental temporal debe ser fiable y proporcionar una protección eficaz. También debe ser fácil de aplicar y eliminar sin dejar ningún residuo. Cavex ha desarrollado la solución ideal para satisfacer estas necesidades: Cavex Temporary Cement. Las propiedades del cemento son perfectas para la cementación de coronas y puentes temporales. Cavex Temporary Cement es fácil de usar, inodoro y estético.

Propiedades perfectamente coincidentes

Cavex Temporary Cement está diseñado específicamente para la cementación de coronas y puentes temporales. Asegura que el elemento

preparado quede completamente sellado, lo que ayuda a prevenir infecciones bacterianas. No contiene eugenol y, por lo tanto, no interfiere con los materiales de composite.

Aplicación

Tome dos partes iguales de los tubos Base y Catalyst y mézclelas con la espátula durante 30 segundos para formar una pasta homogénea. La pasta tiene un tiempo de fraguado de dos minutos en la boca, después del cual se puede eliminar cualquier exceso. El tiempo total de fraguado del cemento es de cinco minutos.

Características

- Fácil de usar
- Sin eugenol
- Colores distintivos
- Sellado perfecto
- Baja solubilidad
- Corto tiempo de fraguado
- Fácil de eliminar



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Los países bajos | cavex.nl

ZYC001ES.00