



## El Material de Impresión Impregum™ Penta™ Soft combina la comodidad de la Unidad de Mezcla Pentamix™ 2 y la nueva *tecnología Soft*.

*Presentamos el Material de Impresión Impregum™ Penta™ Consistencia Mediana y el Material de Impresión Impregum™ Penta™ DuoSoft Consistencia Pesada/Liviana de 3M ESPE. La familia “Soft” de los Materiales de Impresión Impregum™ proporciona la inigualada precisión e hidrofiliicidad inicial de Impregum con:*

- Optima rigidez que facilita la remoción de la boca y del modelo.
- Un sabor neutral que aumenta la comodidad del paciente.

*Sus tres consistencias le permiten usar la técnica de impresión de su preferencia para prácticamente todas las indicaciones clínicas.*

- Impregum Penta Soft consistencia mediana para la técnica de un sólo paso/ monofásica.
- Impregum Penta Soft consistencia pesada/liviana para la técnica de un sólo paso/dos viscosidades simultáneas.

**Mezclar es fácil con la Unidad de Mezcla Pentamix™ 2 y las bolsas de aluminio de Apertura Automática PentaMatic™ de 3M ESPE.**

*Mezcle y dispense automáticamente el material de impresión de manera perfectamente homogénea y libre de burbujas simplemente presionando un botón. El Sistema de Mezcla Pentamix™ 2 es:*

- *Económico:* Use solamente la cantidad exacta de material que necesita.
- *Confiable:* El material perfectamente mezclado asegura una calidad consistente.
- *Higiénico:* El relleno directo del porta impresiones y la jeringa reduce el riesgo de contaminación.
- *Eficiente:* La activación por medio de la presión de un botón permite manejar el material con facilidad y rapidez.



*Material de Impresión Impregum™ Penta™ Soft Consistencia Mediana.*




*Material de Impresión Impregum™ Penta™ DuoSoft Consistencia Pesada/Liviana.*



*El Material de Impresión Impregum™ Consistencia Liviana se encuentra disponible en los siguientes sistemas de dispensado: Sistema de Mezcla Pentamix™ y Sistema de Automezcla Garant™.*




# Técnica de porta impresiones

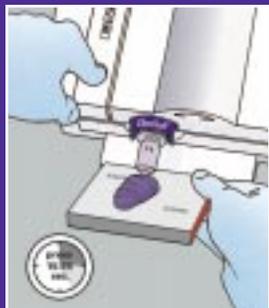


1. Al utilizar un cartucho por primera vez, presione el botón y sangre una pequeña porción de material.




2. Comience a llenar el porta impresiones/cubeta.

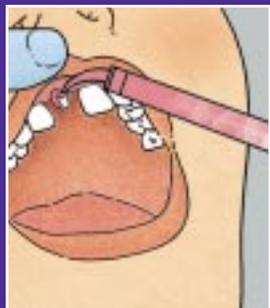


3. Aplique con la jeringa el material de impresión alrededor del diente.

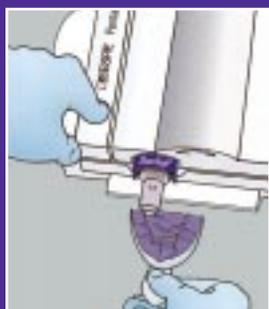

4. Finalice el llenado del porta impresiones/cubeta.

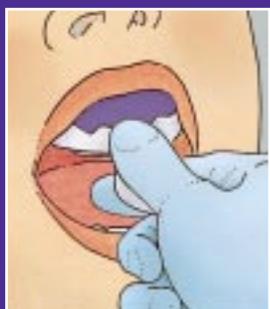

5. Inserte el porta impresiones/cubeta en boca.

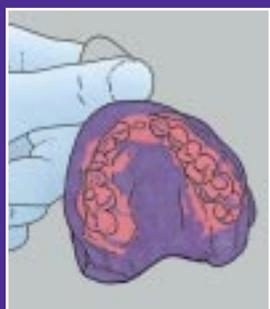

6. Impresión terminada.



1. Inserte la Bolsa de Aluminio<sup>™</sup> Pentamix en el Cartucho Pentamix<sup>™</sup>.



2. Coloque el cartucho en la Unidad de Mezcla Pentamix<sup>™</sup> 2.



3. Dispense automáticamente en el porta impresiones/cubeta y en la Jeringa Pentamix<sup>™</sup>.

## Empaque

### Material de Impresión Impregum<sup>™</sup> Pentamix<sup>™</sup> Soft Consistencia Mediana

#### 31734 - Kit Introductorio

- 1 Pasta base - 300ml
- 1 Catalizador - 60ml
- 1 Cartucho Pentamix
- 10 Puntas mezcladoras Pentamix
- 1 Jeringa elastomérica Pentamix
- 1 Adhesivo de porta impresiones de Poliéter

#### 31730 - Kit de Repuesto

- 2 Pasta base - 300ml
- 2 Catalizadores - 60ml

#### 77787 - Cartucho Pentamix

- 1 Cartucho Impregum Pentamix Soft

### Material de Impresión Impregum<sup>™</sup> Pentamix<sup>™</sup> H<sup>™</sup> DuoSoft Consistencia Pesada

#### 31738 - Kit Introductorio

- 1 Pasta base - 300ml
- 1 Catalizador - 60ml
- 1 Cartucho Pentamix
- 10 Puntas Mezcladoras Pentamix
- 2 Cartuchos Garant 2 - 50ml
- 10 Puntas Mezcladoras Garant 2, blancas
- 10 Puntas Intraorales Garant 2, blancas
- 1 Dispensador Garant 2 1:1/2:1
- 1 Adhesivo para porta impresiones de poliéter

#### 31740 - Kit de repuesto

- 2 Pasta base - 300ml
- 2 Catalizadores - 60ml

#### 77793 - Cartucho Pentamix

- 1 Cartucho Impregum Pentamix H DuoSoft

### Material de Impresión Impregum<sup>™</sup> Pentamix<sup>™</sup> L DuoSoft Consistencia Liviana

#### 31744 - Kit Introductorio

- 1 Pasta base - 300ml
- 1 Catalizador - 60ml
- 1 Cartucho Pentamix
- 20 Puntas Mezcladoras Pentamix
- 1 Jeringa elastomérica Pentamix

#### 31745 - Kit de Repuesto

- 2 Pasta base - 300ml
- 2 Catalizadores - 60ml

#### 77795 - Cartucho Pentamix

- 1 Cartucho Impregum Pentamix L DuoSoft

### Material de Impresión Impregum<sup>™</sup> Garant<sup>™</sup> L DuoSoft Consistencia Liviana

#### 31751 - Kit de repuesto

- 4 Cartuchos Garant 2 - 50ml
- 20 Puntas Mezcladoras Garant 2, blancas

### Accesorios Pentamix<sup>™</sup>

#### 71510 - Puntas Mezcladoras Paquete de Repuesto

- 50 Puntas Mezcladoras

#### 71210 - Jeringa Elastomérica Pentamix

- 1 Jeringa (incl. Cuerpo, puntas, cepillo de limpieza de repuesto)

#### 77600 - Unidad para Montaje en Paredes Pentamix

### Accesorios Garant<sup>™</sup>

#### 71451 - 50 Puntas Mezcladoras Garant, blancas

#### 71461 - 50 Puntas Intraorales Garant, blancas

#### 77580 - 1 Dispensador Garant 1:1/ 2:1

#### 77590 - 1 Émbolo Garant 1:1/ 2:1

**3M ESPE**

### Dental Products

3M Center  
Building 275-2SE-03  
St. Paul, MN 55144-1000

www.3MESPE.com/LA dental

Impreso en papel reciclado.

3M, ESPE, Impregum, Pentamix, y Garant son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG. Impreso en U.S.A. • © 3M 2002. Todos los derechos reservados.