

# Vitremer™



Resumen	Ventajas del producto	Técnica de aplicación	Indicaciones	Información para pedidos
---------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------------------

Vitremer™ es un material para reconstrucción de muñones y restauraciones de ionómero de vidrio con tecnología patentada de triple polimerización.

- Tecnología patentada de triple polimerización: fotopolimerización, polimerización química y reacción adicional de polimerización de ionómero de vidrio
- Gran estética gracias a seis tonos estándar y dos tonos especiales
- Poca abrasión
- Gran liberación de flúor
- Sistema versátil que permite ser foto polimerizado o auto polimerizado, para cubrir todas sus necesidades de aplicación.
- Su exclusiva química de polimerizado en oscuro permite su colocación en una sola intención, lo que elimina la necesidad de la colocación en capas y ahorra tiempo.
- Demuestra el fraguado de un ionómero de vidrio verdadero en cuya polimerización se libera flúor durante un tiempo prolongado y su adhesión a la estructura dental, brindándole una mayor confianza al odontólogo.
- Como material restaurador, brinda excelentes propiedades de manipulación y un tiempo de trabajo en boca prolongado para facilitar su uso.
- Disponible en una extensa gama de tonos para una mejor coincidencia con el color de la estructura dental existente para el logro de restauraciones más estéticas.

Disponible en tono A3, pediátrico para su uso en odontopediatría y azul para reconstrucción de muñones.

- Antes de dispensar, agitar el frasco para que el polvo se disperse.
- Cerrar herméticamente los dos frascos después de usarlos.
- Tiempo de trabajo (incluyendo mezcla).
- Vitremer™ 3:00 min.

- Fotopolimerización Vitremer™ 40 seg.
- Reconstrucción de muñones antes de colocación de corona
- Obturación de zonas retentivas en tallados para coronas
- Restauraciones de clase I y II en dientes temporales
- Restauraciones permanente de clase III y V
- Restauración de lesiones por caries radicular
- Base cavitaria

<b>Referencia</b>	<b>Información del Producto</b>
<b>3303MP-A3</b>	1 - Ionómero de vidrio restaurativo Vitremer™ - Polvo 5 gr, Líquido 2.5 ml, Primer 2ml, Abrillantador 2ml
<b>3303L</b>	1 - Repuesto Líquido Vitremer™ de 8 Ml
<b>3303A3</b>	1 - Repuesto Polvo color A3 Vitremer™ de 9g