



NOMBRE DEL PRODUCTO:

EYECTOR DE SALIVA

NOMBRE GENERICO:

CANULA DE SUCCION DE SALIVA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Los eyectores de saliva son desechables, flexibles, se ajustan de forma única a la boca de cada paciente y mantienen la forma. Las puntas son suaves y están adheridas al tubo para una máxima seguridad del paciente. Estos eyectores proporcionan una succión óptima sin aspirar tejido y garantizan un funcionamiento sin obstrucciones.

CARACTERISTICAS FISICAS:

Material PVC atoxico
Hilo de cobre que mantienen la forma del ángulo deseado por el dentista
No reutilizable, un solo uso
No estériles
Libre de látex
Ø 6,5 mm
Longitud 15 cm
Boquilla fija de forma redondeada
Colores Transparente, rojo, rosado, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura, blanco

COMPOSICION:	Boquilla: PVC atoxico Tubo: PVC atoxico y alambre recubierto en cobre
PRESENTACION:	Bolsa x 100 unidades Caja x 10 paquetes de 100 unidades Caja x 50 paquetes de 100 unidades
INDICACIONES DE USO:	Aspiración de saliva y otros fluidos generados en los diferentes procedimientos odontológicos.
INSTRUCCIONES DE USO:	Tome de la bolsa un eyector de saliva Verifique que el eyector no tenga ninguna perforación o se encuentre defectuoso Ubíquelo en la punta del succionador de baja potencia de la unidad odontológica Verifique que se encuentre correctamente ajustado Realice el pliegue o dobléz en forma de gancho de acuerdo a su necesidad Ubíquelo en la boca del paciente
CONTRAINDICACIONES:	Procedimientos que no sean los indicados
ADVERTENCIAS:	-Revise el eyector antes de usar, que no se encuentre defectuoso o que contenga alguna condición que pueda generar alguna falla al momento de usar. -No volver a utilizar, la reutilización puede causar infecciones agudas o crónicas en el paciente. -Mantener limpio el ambiente donde se almacena el dispositivo médico y adoptar un procedimiento correcto de higiene en su manipulación. -Dispositivo médico de uso profesional únicamente.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:	Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco y aireado.
TIEMPO DE VIDA UTIL:	El producto no expira.

ANEXO

IMÁGENES PRODUCTO



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3